

TELESMART-Patientenhinweise

Herstellerkontakt

Sollten Sie Fragen zu dem TELESMART-Recorder haben oder einen unerwarteten Betriebsfall bemerken, so kontaktieren Sie bitte Ihre Arztpraxis oder:

Medset Medizintechnik GmbH, Curslackner Neuer Deich 66, D-21029 Hamburg
Tel.: +49(0)40 / 72 58 22-0 , Fax: +49(0)40 / 72 58 22-11
http: www.medset.com , E-Mail: info@medset.com

Bedienungshinweise

Der TELESMART-Recorder ist ein besonders sicherer und einfach zu bedienender Langzeit-EKG-Recorder. Dennoch sollten Sie die folgenden Warnungen und Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.

Dieses Informationsblatt ersetzt nicht die Einweisung in die Bedienung durch das ärztliche Personal Ihrer Arztpraxis oder die Gebrauchsanweisung des TELESMART-Recorders. Bitte wenden Sie sich für weiterführende Fragestellungen und Informationen an Ihre Arztpraxis.

Die behandelnde Ärztin/Der behandelnde Arzt hat bereits die Ableitelektroden angelegt, diese an den Recorder angeschlossen und die Aufnahme gestartet. Auf der Anzeige kann nun abgelesen werden, dass die Aufnahme gestartet wurde und welcher Zeitraum seitdem verstrichen ist. Außerdem ist der prozentuale Ladezustand der Batterie bzw. des Akkus durch das Piktogramm einfach erkennbar.

Durch kurzes Drücken der großen, zentralen Marker-Taste kann maximal alle 2 Minuten ein Zeitpunkt der Aufnahme markiert werden um so aktiv an der Diagnose mitzuwirken. Ein akustisches Signal bestätigt das Auslösen dieser Funktion.

Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus.

Das Gerät darf nur unter folgenden Umweltbedingungen betrieben werden:

- +10°C bis +45°C Umgebungstemperatur
- 10% bis 95% relativer Luftfeuchte (ohne Kondensation)
- 700 hPa bis 1060 hPa Luftdruck

Bitte beachten Sie weiterhin, dass:

- das Gerät nicht aus der Tragetasche entfernt wird.
- die Elektroden und Kabel beim Kleidungswechsel nicht abgerissen werden.
- nicht mit dem Gerät geduscht wird oder es in anderer Form direkt Flüssigkeit ausgesetzt wird.

Ist Flüssigkeit in das Gerät gelangt oder wurde es mechanisch extrem beansprucht, sind sofortige Instandsetzungsarbeiten durch den Medset-Kundendienst erforderlich. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre Arztpraxis.

Bitte führen Sie keinesfalls selbständig Reinigungs- oder Desinfektionsarbeiten am TELESMART oder dessen Zubehör durch, sondern überlassen Sie diese Arbeiten Ihrer Arztpraxis.

Bitte vermeiden Sie es während der Aufzeichnung an den Elektroden zu kratzen oder an den Elektrodenleitungen zu ziehen.

Bitte füllen Sie das Ihnen ausgehändigte Formblatt für das Patiententagebuch sorgfältig aus.

Sicherheits- und Warnzeichen

- ! Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung eine Gefährdung des Bedienpersonals, Patienten oder Geräts zur Folge haben.



Gebrauchsanweisung beachten!



Gebrauchsanweisung befolgen!



Anwendungsteil des Typs BF.



Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.



Vor Nässe schützen!

IP50

Eindringenschutz des Gehäuses: Schutz gegen das Einführen eines Drahts.

IP02

Eindringenschutz der Recordertasche: Schutz ist gegen das Eindringen von leichtem Tropfwasser.

Sicherheitshinweise

! Das Gerät darf nicht verändert und muss stets in Übereinstimmung mit diesem Informationsblatt und

- der Gebrauchsanweisung verwendet werden. Instandhaltungen und Reparaturen sind ausschließlich vom Medset-Kundendienst vorzunehmen. Andernfalls ist Medset für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Funktion des Geräts nicht verantwortlich. Bitte trennen Sie zuerst die Elektroden vom Patienten, bevor Sie das Patientenkabel vom Recorder trennen.

! Alle Teile des Systems, insbesondere die Elektroden und Elektrodenleitungen, dürfen am Patienten nur

- mit gesunder Haut in Berührung kommen. Der Recorder muss stets unter der Kleidung getragen und mit dem mitgelieferten Bauchgurt fixiert werden. Wird der Recorder an Kleinkindern oder nur eingeschränkt zu rechnungsfähigen Patienten angewandt, so sind alle Gurte, Kabel und die Batterieabdeckung z.B. mit Pflastern so zu fixieren, dass eine Erstickungs- oder Strangulierungsgefahr ausgeschlossen ist.

! Flüssigkeiten dürfen niemals in den Recorder gelangen. Ist Flüssigkeit in den Recorder eingedrungen, so

- darf er erst nach einer Überprüfung durch den Medset-Kundendienst wieder in Betrieb genommen werden.

! Es ist sofort ein Arzt aufzusuchen, sollte es zu Hautirritationen kommen.

-

! Bitte wickeln Sie die Kabel nicht um den Recorder, da dadurch die Lebensdauer der Kabel erheblich verkürzt wird.

-

! Der TELESMA-Recorder ist ein Anwendungsteil von Typ BF mit einem höherwertigem Schutz gegen

- elektrischen Schlag. Die Signaleingänge bieten **keinen** Schutz gegen die Wirkungen einer Entladung eines Defibrillators am Patienten. Vor einer Defibrillation sind die Elektroden und die Elektrodenleitungen vom Patienten zu entfernen.

! Bitte beachten Sie, dass die leitfähigen Teile der Elektrodenleitungen von allen elektrischen Geräten,

- Netzanschlüssen sowie leitfähigen und geerdeten Teilen fernzuhalten sind.

! Das Gerät darf nicht im Umfeld von Röntgengeräten, Tomografen usw. betrieben werden, da diese aufgrund ihrer zulassungsgemäß höheren Abgabe elektromagnetischer Felder andere Geräte stören können.

-

! Das Geräte ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen (z.B. aufgrund von Anästhesie- oder Desinfektionsmitteln) oder in Bereichen mit verbrennungsfördernder Atmosphäre (z.B. aufgrund >25% Sauerstoff in der Umgebungsluft) bestimmt.

-