

Anwendungshinweis zu PADSY-Software

Backup der PadsyServer-Daten

Um Sie bei der Sicherung Ihres Datenbestandes zu unterstützen, empfehlen wir Ihnen dringend ein regelmäßiges Backup Ihrer PADSY Patienten- und Aufzeichnungsdaten.

Diese kurze Anleitung erklärt, wie Sie ein solches Backup automatisieren können. So ist die Sicherheit durch eine einmal durchzuführende Einstellung laufend gewährleistet.

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

Alle Patienten-Daten und alle Aufzeichnungen liegen im database-Verzeichnis im Installations-Ordner des PADSY-Servers. Erweitern Sie Ihr Backup-Programm entsprechend, sodass dieses Verzeichnis (oder alternativ das gesamte PadsyServer-Verzeichnis) mit gesichert wird.

Nach Möglichkeit beenden Sie den PadsyServer-Dienst über Ihr Backup-Programm oder per Script mit einem *net stop PadsyServer*(Windows) bzw. einem */Applications/PadsyServer/PadsyServer stop* (Mac OS X; Pfad ggf anpassen, Admin-Passwort notwendig), bevor das Backup-Programm auf die Daten zugreift. Im Anschluss muss der PadsyServer-Dienst selbstverständlich wieder gestartet werden (*net start PadsyServer* bzw. */Applications/PadsyServer/PadsyServer start*).

Zu beachten ist hierbei lediglich, dass das Backup **nicht** um Mitternacht läuft, da um diese Zeit der PadsyServer auf die Datenbank zugreift. Dieser Vorgang kann - abhängig von der Größe der Datenbank - eine Weile dauern.

Medset, im Oktober 2017

Medset Medizintechnik GmbH · Curslacker Neuer Deich 66 ·
D-21029 Hamburg · Germany
phone: +49 (0) 40-725 822 0 · fax +49 (0) 40-725 822 11
info@medset.com · www.medset.com